



## ⚠️ AVERTISSEMENTS

- Lire, comprendre et suivre toutes les instructions. ⚠️ Signe d'avertissement jaune indique Tendeur est en MODE DE PRESSE, NE PAS transporter l'occupant lorsqu'il est visible.
- Les crochets en J doivent être attachés au châssis rigide d'un fauteuil roulant (pas aux rayons ni aux composants amovibles) et les crochets arrière en J à un angle d'environ 30 à 45 degrés par rapport au plancher.
- La ceinture épaulière et abdominale (nous recommandons l'utilisation des deux) doit passer sur l'épaule et le bassin de l'occupant et ne pas être portée torsadée ou retenue loin du corps de l'occupant par des composants du fauteuil roulant.

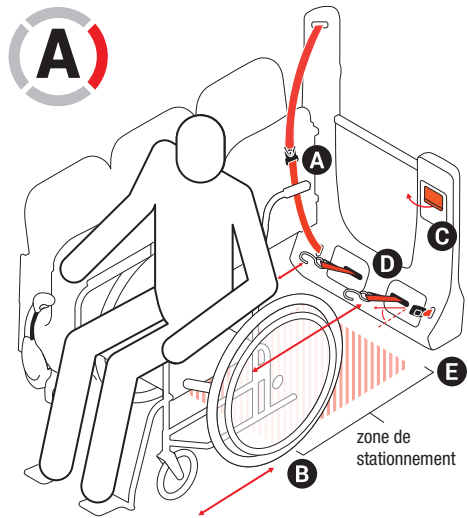


par ex. Sangle d'arrimage à crochet en J

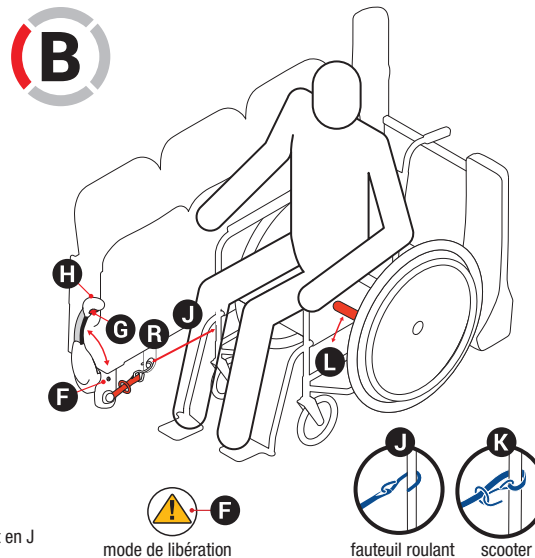

mode de libération

fauteuil roulant scooter

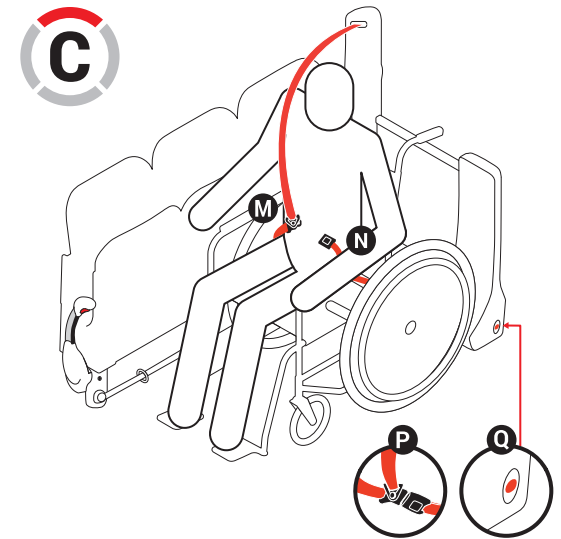

## SECURISER ET ARRIMER

### (A) ARRIÈRE

1. Attachez le connecteur à fiche de la ceinture épaulière à la fiche de la ceinture abdominale côté paroi, puis fixez solidement les ceintures de sécurité sur la fiche de rangement sous le siège rabattable **A**.
2. Reculez le fauteuil roulant dans la zone de stationnement **B**.
3. Tirez sur la poignée à palette **C** pour libérer les enrouleurs arrière et activer la minuterie Xpress.
4. Fixez les deux crochets arrière en J au châssis arrière du fauteuil roulant **D**.
5. Reculez le fauteuil roulant dans la zone de stationnement **E** et contre les butées latérales ou la proximité la plus proche.

### (B) AVANT

1. Assurez-vous que tendeur est en mode de libération ⚠️ **F**.
2. Attachez le crochet avant en J au châssis avant côté paroi du fauteuil roulant **J**. Pour les scooters électriques attachez le crochet en J autour du châssis de la roue avant, puis insérez le crochet en J (orienté vers l'extérieur) à travers l'anneau **K**.
3. Appuyez sur le bouton **G**, tirer vers le bas la poignée de tension **H**, relâcher le bouton, et la poignée de manivelle jusqu'à ce que la tension complète est atteinte et embrayage patine. Assurez-vous que panneau d'avertissement ⚠️ **F** est visible.
4. Sécurisez les roues **L** ou coupez le courant du fauteuil.

### (C) CEINTURES DE SÉCURITÉ

9. Passez la ceinture épaulière et la ceinture abdominale côté paroi sur l'épaule et la hanche de l'occupant **M**; puis, bouclez-les sur la ceinture abdominale côté couloir **N**.
10. Les ceintures de sécurité bouclées doivent se trouver contre la hanche **P** de l'occupant.
10. L'occupant et le fauteuil roulant sont fixés solidement et prêts à partir.

## LIBERER

### (C) CEINTURES DE SÉCURITÉ

1. Détachez la connection teton de la ceinture épaulière placé → sur la ceinture abdominale **M**.
2. Débouclez la ceinture abdominale **N** et placer toutes les ceintures de sécurité dans le stockage.
- ⚠️ Si besoin est, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la ceinture de sécurité **Q**.

### (B) AVANT

3. Appuyez sur le bouton **G**, repousser la poignée de tension **H** et relâcher le bouton pour relâcher la tension J-crochet avant ⚠️ **F**.
4. Retirez le crochet avant en J du châssis du fauteuil roulant **J** ou du scooter **K**. Placez crochet dans l'anneau de stockage **R**.
5. Déverrouillez les roues **L** ou remettez le courant au fauteuil.

### (A) ARRIÈRE

6. Tirez sur la poignée à palette **C** pour libérer les enrouleurs arrière et activer la minuterie Xpress.
7. Déplacez le fauteuil roulant en avant et retirez les crochets arrière en J du châssis arrière du fauteuil roulant et placer crochets dans le stockage **D**.
8. L'occupant et le fauteuil roulant sont libérés et prêts.