

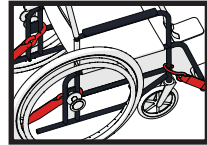
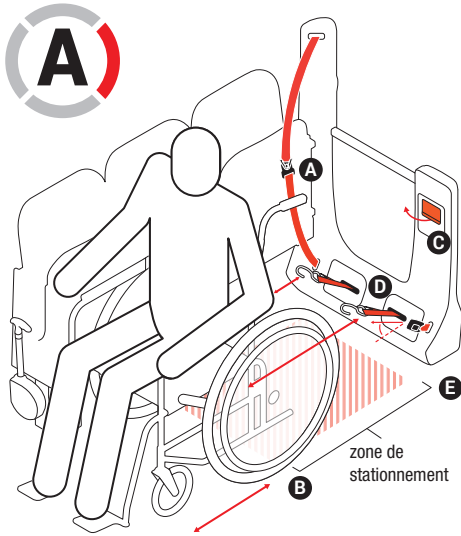


## ⚠️ AVERTISSEMENTS

- Assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre toutes ces instructions.
- Les crochets en J doivent être attachés au châssis rigide d'un fauteuil roulant (pas aux rayons ni aux composants amovibles) et les crochets arrière en J à un angle d'environ 30 à 45 degrés par rapport au plancher.
- La ceinture épaulière et abdominale (nous recommandons l'utilisation des deux) doit passer sur l'épaule et le bassin de l'occupant et ne pas être portée torsadée ou retenue loin du corps de l'occupant par des composants du fauteuil roulant.

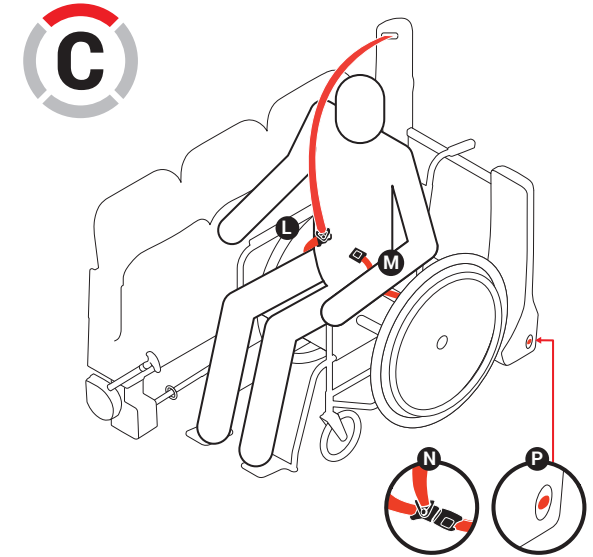

par ex. Sangle d'arrimage à crochet en J

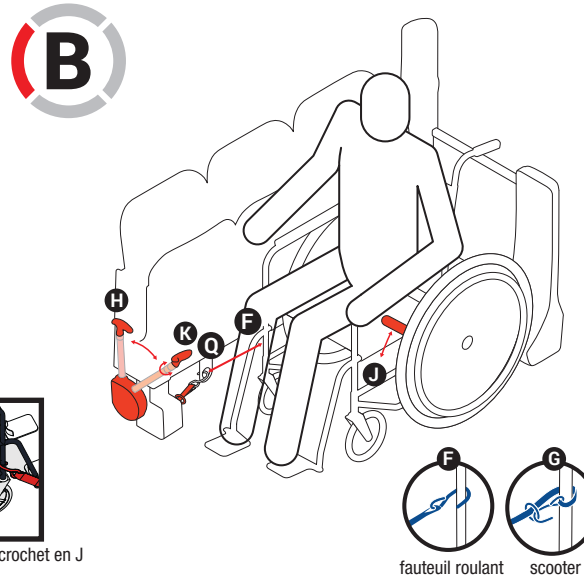

## SECURISER ET ARRIMER

### A) ARRIÈRE

1. Attachez le connecteur à fiche de la ceinture épaulière à la fiche de la ceinture abdominale côté paroi, puis fixez solidement les ceintures de sécurité sur la fiche de rangement sous le siège rabattable **A**.
2. Reculez le fauteuil roulant dans la zone de stationnement **B**.
3. Tirez sur la poignée à palette **C** pour libérer les enrouleurs arrière et activer la minuterie Xpress.
4. Fixez les deux crochets arrière en J au châssis arrière du fauteuil roulant **D**.
5. Reculez le fauteuil roulant dans la zone de stationnement **E** et contre les butées latérales ou la proximité la plus proche.

### B) AVANT

6. Attachez le crochet avant en J au châssis avant côté paroi du fauteuil roulant **F**. Pour les scooters électriques attachez le crochet en J autour du châssis de la roue avant, puis insérez le crochet en J (orienté vers l'extérieur) à travers l'anneau **G**.
7. Tirez la manette de tension vers le bas **H** pour tendre le crochet avant en J **F**.  
⚠️ Evitez une tension excessive sur le crochet en J.
8. Sécurisez les roues **J** ou coupez le courant du fauteuil.

### C) CEINTURES DE SÉCURITÉ

9. Passez la ceinture épaulière et la ceinture abdominale côté paroi sur l'épaule et la hanche de l'occupant **L**; puis, bouclez-les sur la ceinture abdominale côté couloir **M**.
- ⚠️ Les ceintures de sécurité bouclées doivent se trouver contre la hanche **N** de l'occupant.
10. L'occupant et le fauteuil roulant sont fixés solidement et prêts à partir.

## LIBERER

### C) CEINTURES DE SÉCURITÉ

1. Détachez la connection teton de la ceinture épaulière placée → sur la ceinture abdominale **L**.
2. Débouclez la ceinture abdominale **M** et placez toutes les ceintures de sécurité dans le stockage.
- ⚠️ Si besoin est, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la ceinture de sécurité **P**.

### B) AVANT

3. Tirez la manette de tension vers le bas **H** et tournez-la **K**, puis remettez la manette de tension en position verticale **H** pour relâcher la tension du crochet avant en J **F**.
4. Retirez le crochet avant en J du châssis du fauteuil roulant **F** ou du scooter **G**. Placez crochet dans l'anneau de stockage **G**.
5. Déverrouillez les roues **J** ou remettez le courant au fauteuil.

### A) ARRIÈRE

6. Tirez sur la poignée à palette **C** pour libérer les enrouleurs arrière et activer la minuterie Xpress.
7. Déplacez le fauteuil roulant en avant et retirez les crochets arrière en J du châssis arrière du fauteuil roulant et placez crochets dans le stockage **D**.
8. L'occupant et le fauteuil roulant sont libérés et prêts.